



疲れたカラダの疲労回復

圧倒的なハイパワー高周波

1台で3役のマルチセラピー

ハイパワー高周波(ラジオ波)温熱機器
RAFOS Premium

Contents

高周波について

ハイパワー高周波(ラジオ波)温熱機器
RAFOS Premium

高周波とは
高周波とマイクロ波の違い
高周波温熱による深部加温のメカニズム
体外からの温熱と体内からの温熱の違い

RAFOSによる温熱治療

RAFOS Premiumとは
電極 (RET/CET/MULTIPOLAR)
パワーボリューム (温度調整)
モード (プログラム)

RAFOS Premiumの機能性①
RAFOS Premiumの機能性②

RAFOS導入運用ケース

RAFOS Premiumのできること
RAFOS Premium導入の運営ケース STEP1
RAFOS Premium導入の運営ケース STEP2
RAFOS Premium導入の運営ケース STEP3
導入時の収益シミュレーション

RAFOSの導入実店舗

クリニック
エステサロン
コンディショニング
スポーツ

高周波温熱機器の比較

高周波温熱機器製品比較一覧
高周波温熱機器製品の差別化

高周波について

高周波とは

電波の周波数一覧

高周波

マイクロ波

周波数	波長(m)	名称		一般用途	工業用途		
30~300Hz	$10^7 \sim 10^6$	低周波	可聴周波				
300~3000Hz	$10^6 \sim 10^5$						
3~30KHz	$10^5 \sim 10^4$	電波	長波 中波 短波 超短波	放送 通信	誘導加熱		
30~300KHz	$10^4 \sim 10^3$						
300~3000KHz	$10^3 \sim 10^2$						
3~30MHz	$10^2 \sim 10^1$			TV放送	高周波 誘電加熱		
30~300MHz	$10^1 \sim 1$						
300~3000MHz	$1 \sim 10^{-1}$	300GHz	種超短波 ミリ波	レーダー	マイクロ波加熱		
3~30GHz	$10^{-1} \sim 10^{-2}$						
30~300GHz	$10^{-2} \sim 10^{-3}$						
300~3000GHz	$10^{-3} \sim 10^{-4}$						
	$10^{-4} \sim 10^{-5}$	光線	遠赤外線 近赤外線 可視光線 紫外線		赤外線加熱		
	$10^{-5} \sim 10^{-6}$						
	$10^{-6} \sim 10^{-7}$						
	$10^{-7} \sim 10^{-8}$						
	$10^{-8} \sim 10^{-9}$	放射線	X線 γ線	物理実験 医療用			
	$10^{-9} \sim 10^{-10}$						
	$10^{-10} \sim 10^{-11}$						
	$10^{-11} \sim 10^{-12}$						
	$10^{-12} \sim 10^{-13}$						

高周波とは、電波のことです。

さらに電波は、長波・中波・短波・超短波などに分類されます。

電波は、テレビ・ラジオ・携帯電話などの通信や、電子レンジなどの加熱に使われる私たちにとって最も身近な電波といえます。

高周波 : 30KHz~300MHz
 マイクロ波 : 300MHz~300GHz

Rafos Premium使用周波数

- ・300KHz(0.3MHz)
- ・500KHz(0.5MHz)

【単位】

- 1000Hz=1KHz
- 1000KHz=1MHz
- 1000MHz=1GHz

高周波とマイクロ波の違い

電波の周波数帯による加温の違い

周波数と秒間の波数

種類	周波数	秒/波数
高周波	30KHz~300Mhz	秒/50万
マイクロ波	3,000Mhz以上	秒/30億

加温方法と説明

種類	加温方法	説明
高周波	ジュール熱	交流電流を通し、イオンを活性化させ、活性したイオンが衝突・摩擦を起こすことで発生する熱エネルギーなので深部から加温する。
マイクロ波	マイクロ波加温	マイクロ波をあてると分子が振動し熱を出します。


熱の伝導としては

周波数(高周波は30~300Mhz)は低ければ加温する深さが深く、なおかつ均等です。
 周波数(マイクロ波は3,000Mhz)が高ければ加温する深さが浅く、なおかつ不均等になる。
 という性質があります。


高周波温熱による深部加温のメカニズム

深部から体内を温める「ジュール熱」発生までの仕組み

深部加温までの流れ

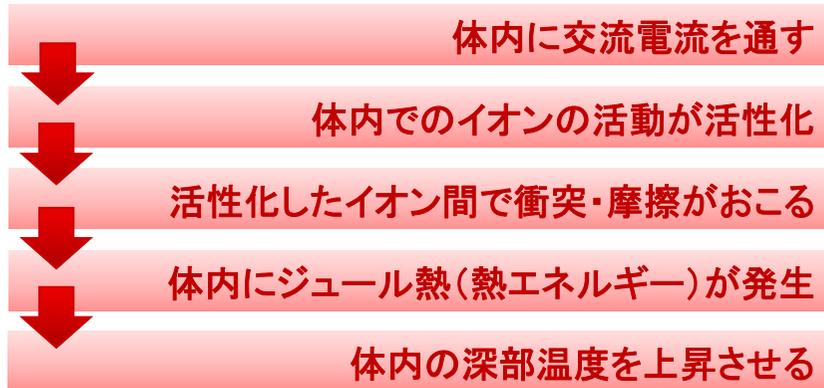


2つの異なる電極間(電極とプレート)でカラダを挟み、体内に「ジュール熱」(細胞分子間の移動で生じる摩擦熱)が発生します。これを繰り返すことで表面ではなく、体内から熱源を発生し身体全体に温度を上昇させ気持ちのいい「加温効果」をもたらします。

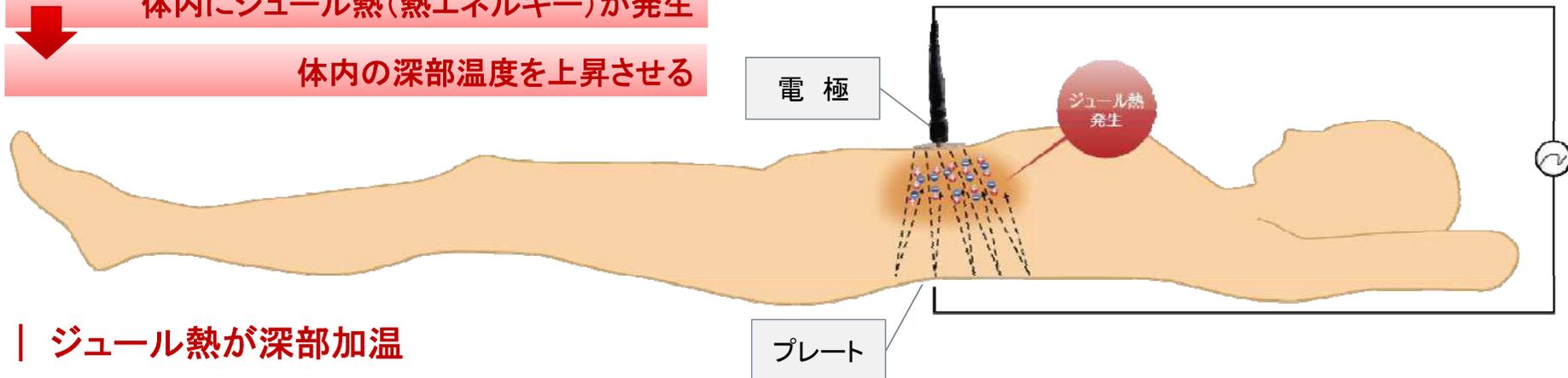

ジュール熱が深部加温

イオン間の衝突が発生
(ジュール熱が発生)

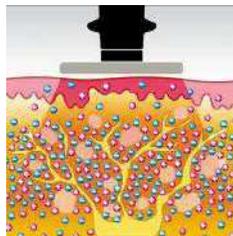

体内でのイオン運動が活性化

体内の深部に熱を発生
(40°C~)



「ジュール熱」とは

高周波電流(電磁波エネルギー)が細胞の分子を移動させて生じる「摩擦熱」(生体熱)とも呼ばれる熱です。

体内からの温熱と体外からの温熱の違い

表面からの加温と深部加温による温熱の違い



「真まで温まる」と言葉にしますがしばらくすると温まっていた**身体が冷えてしまう**・・・
 これは、温泉に入ることでお湯が一時的に体内の毛細血管を温められた血液が体内を巡るため、身体が温かくなったと感ずるのです。
 お湯から**あがって時間が経つと温かさも失われてしまう**わけです。

ジュール熱による**深部加温**



体内から発生するジュール熱は、身体に高周波電流を通すことで、細胞同士が衝突することによって起こる摩擦熱ですので、体内からの熱、これが**“深部加温”**の機能なのです。
 深部加温されたジュール熱の温熱は持続していきます。


だから

筋肉や骨、脂肪、内臓などをダイレクトに加温することで、
 痛みの緩和、疲労の早期回復、リハビリとして活用されています。

RAFOSによる深部加温セラピー

RAFOS Premiumとは

RAFOS Premiumは三種の機能の組み合わせであらゆる施術に対応可能

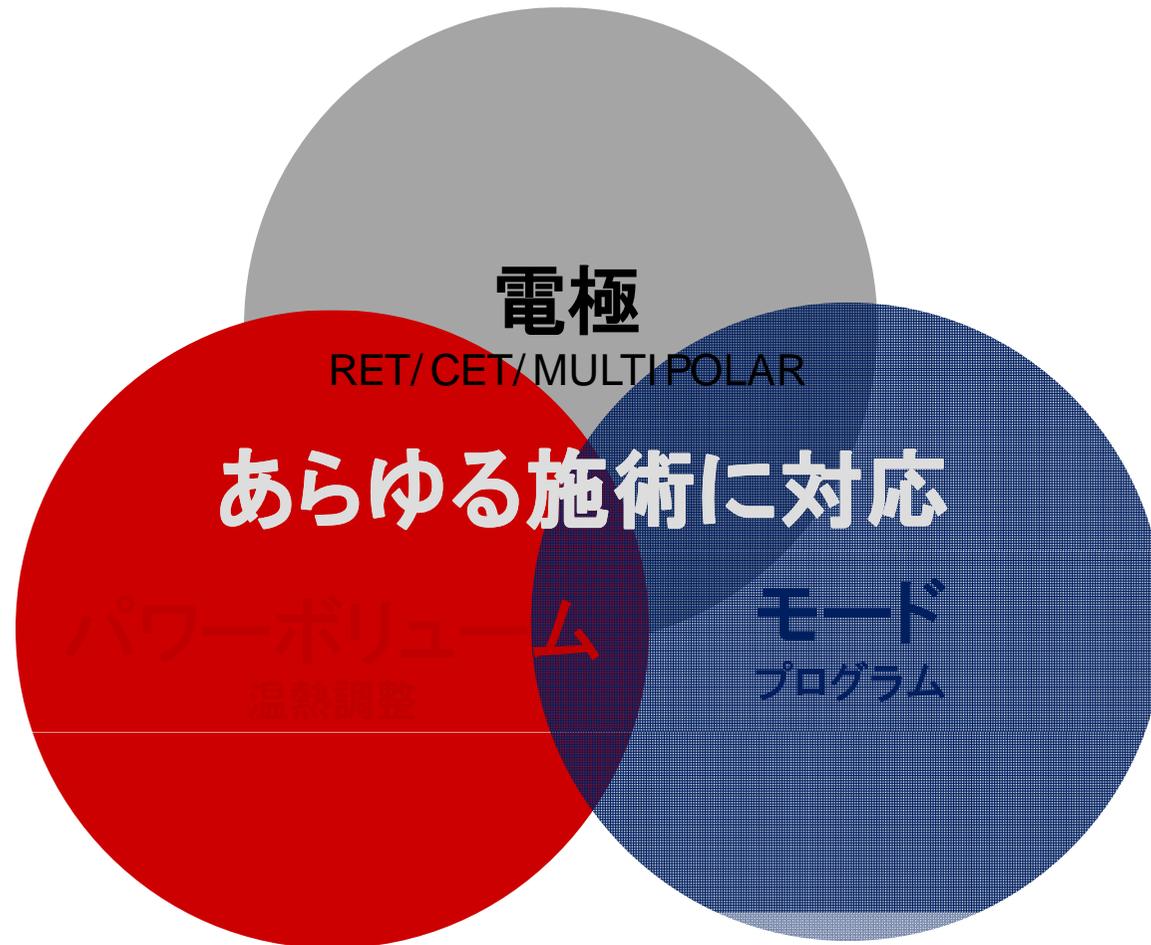

だから効果が出る

結果を出す施術

RAFOS プレミアムだからできる3役
それは脂肪を「燃焼」「分解」「運搬」の流れにあるのです。


RET
(Resistive Electric Transfer)



燃焼

深部に RET 方式

RETの深部加温で
深部から脂肪を燃焼

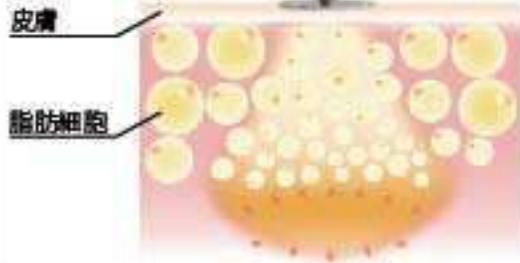

皮膚
脂肪細胞

CET
(Capacitive Electric Transfer)



分解

表皮に近い CET

CETプローブのエッジをたてて
流し込むイメージで動かす



皮膚
脂肪細胞


CET
(Capacitive Electric Transfer)



運搬

表皮に近い CET

RETとCETの相乗効果で
燃焼分解された脂肪は
血液に運搬され尿など
で排出されます。

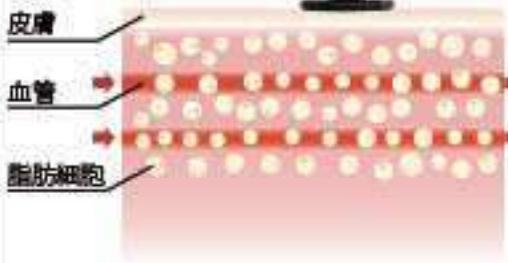

皮膚
血管
脂肪細胞

電極 (RET/CET/MULTIPOLAR)

RAFOS Premiumは異なる三種類の電極を使い分けて効果範囲を選べる


RET Resistive Electrode Transfer

非絶縁の電極をあてることにより、皮下の深い部分にひろく広がる温熱で深部加温し身体全体に温度を上昇させていきます。より深く広く伝わる温熱は、全身、腹部、大腿部等大きな筋肉や皮下脂肪層に効果が高いです。

【対象部位】
腹部、大腿部、セルライト



RET 深部加温イメージ

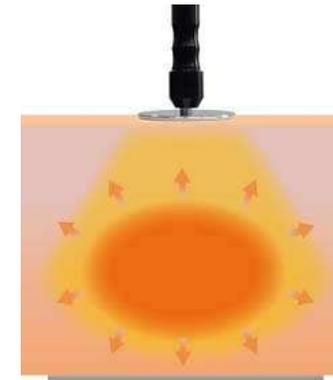

CET Capacitive Electrode Transfer

半絶縁の電極をあてることにより、皮下に温熱を発生させて深部加温し身体の温度を上昇させていきます。皮下に伝わる温熱は、ボディケア・コンディショニング・リンパドレナージュ等などに効果が期待できます。

【対象部位】
二の腕、顔、デコルテ、ふくらはぎ



CET 深部加温イメージ



MULTIPOLAR

対極プレートを使用せずに、先端の三点を皮膚に接触させることで深部加温が可能になり、首・肩・顔などの凝り、リフトアップ、等に効果が期待できます。



パワーボリューム(温度調整)

施術に合わせたパワー調整が可能

RAFOS Premiumは細かな温度調整が可能となります。
 症状や目的に合わせた効率の良い温熱を作ることができます。




パワーボリューム

パワーボリューム

0~99%のコントロールが可能





2~3%変えるだけで体感温熱が変わる

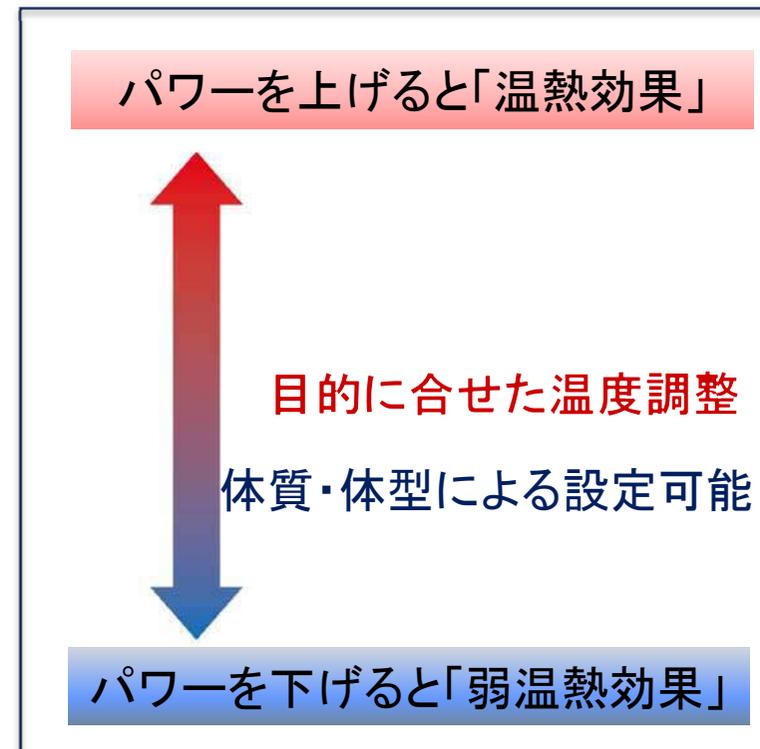

モード(プログラム)

RAFOS Premiumは施術に合せた高周波プログラムが6モードあります。

RAFOS Premiumは6つの出力プログラムが選択できます。連続に高周波を放射するモードと出力のON/OFFのサイクル時間を選択可能なモードがあり、それぞれの施術内容により詳細で効率の良いプログラムを選択できます。

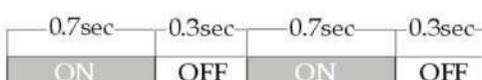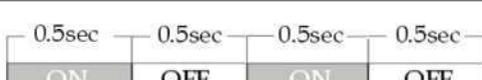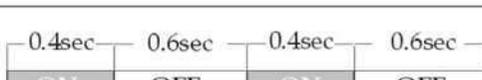
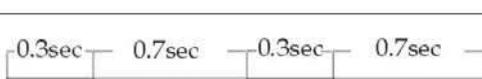
機能	方式	モード	プログラム	症状
AUTO (TEMP設定)	CET ONLY			慢性期
MANUAL (INT.設定)	RET CET MULTI			 慢性期 ⇕ 亜急性期 ⇕ 急性期
				
				
				
				

※ AUTOモードはCET方式のみ、使用が可能です。



DD-RF



ダイナミック・ダイレクト・システム

MEIJI UNIVERSITY a department of science and technology SATOH profesor
VS NIPPON MEDICAL CENTER orthopedics Takahashi Doctor

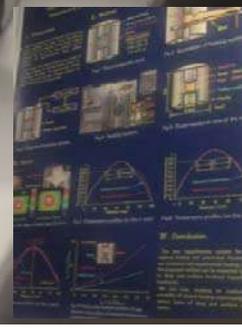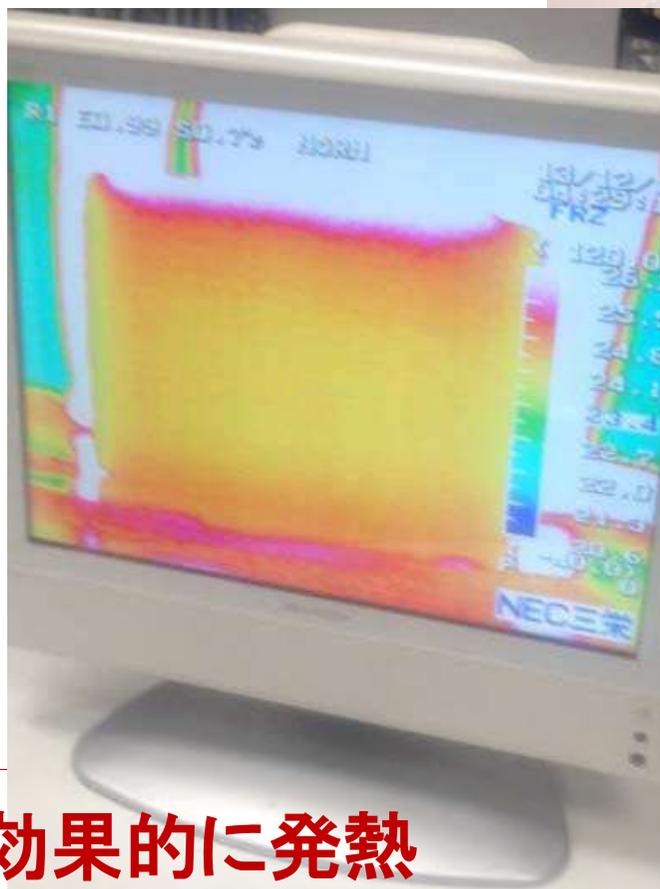


より深く、早く、効果的に発熱

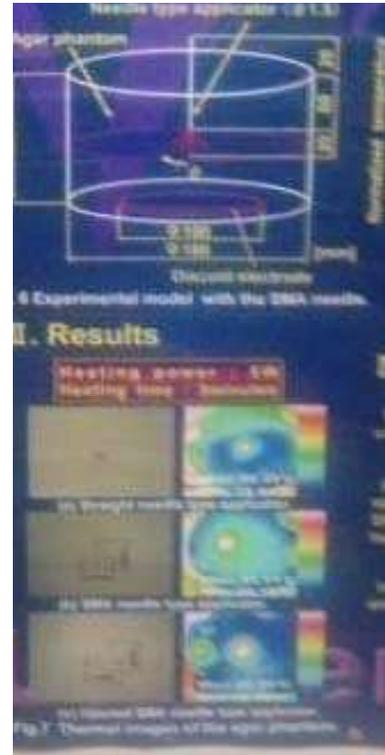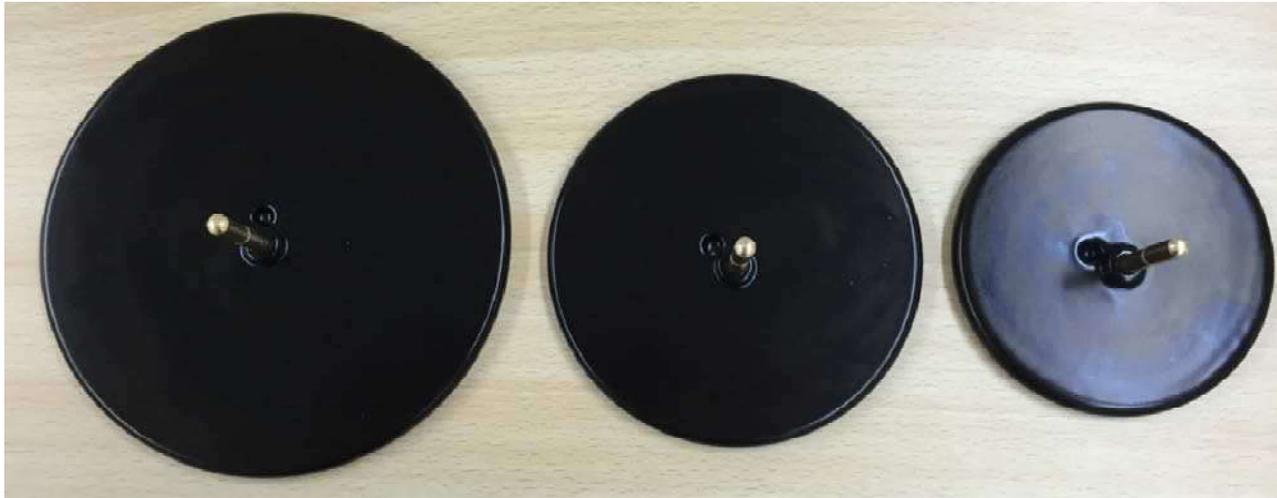

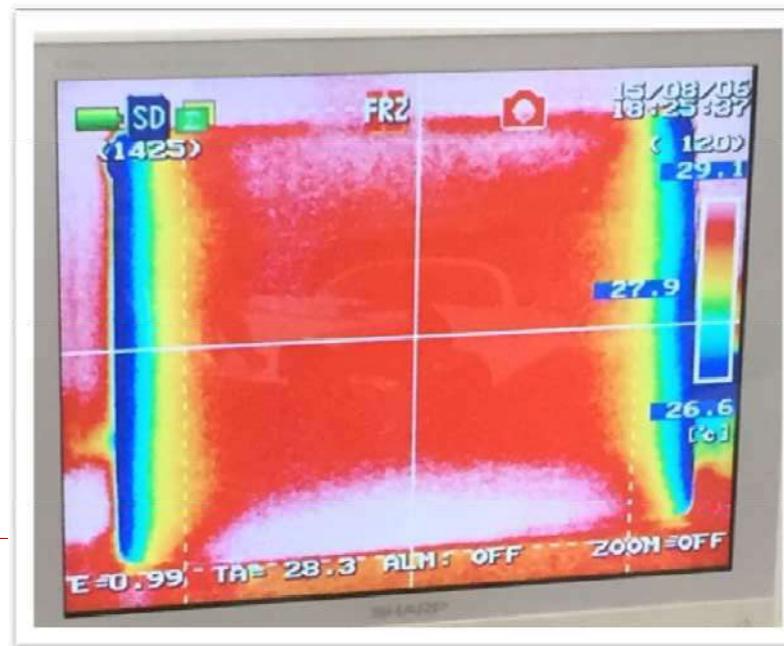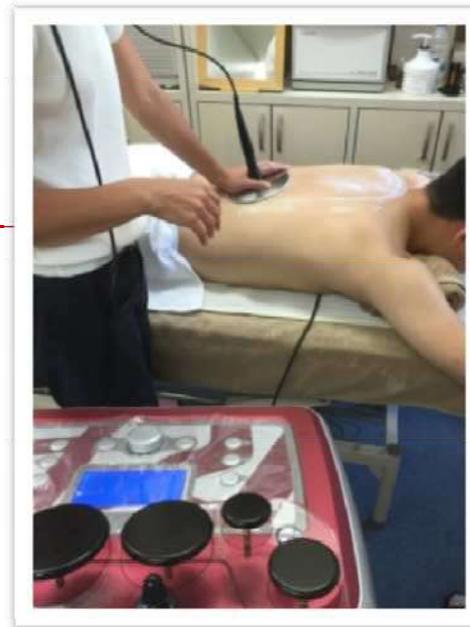


熱伝導試験により証明!!

スピードが
パワーが
熱容量が **3倍**

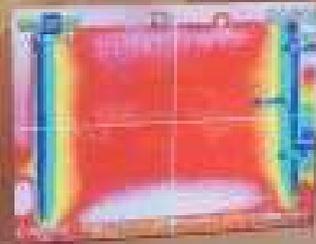


ダイナミック・ダイレクト高周波
DD-RF

RF Radio Frequency

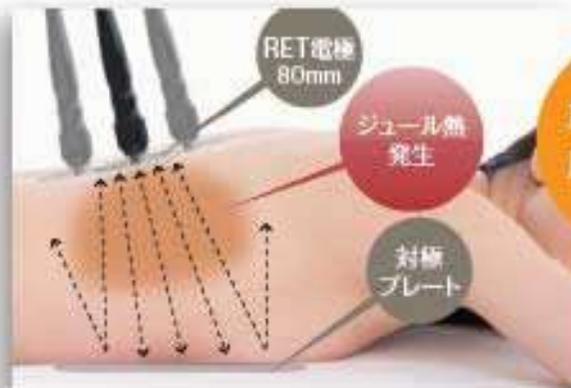

従来の電極は電極のエリアでジュール熱を発生させ、施術と同様に動かす事で腕をキープしてきました。特にハンドセラピーとの併用に効果を発揮します。

DD-RF Dynamic Direct Radio Frequency

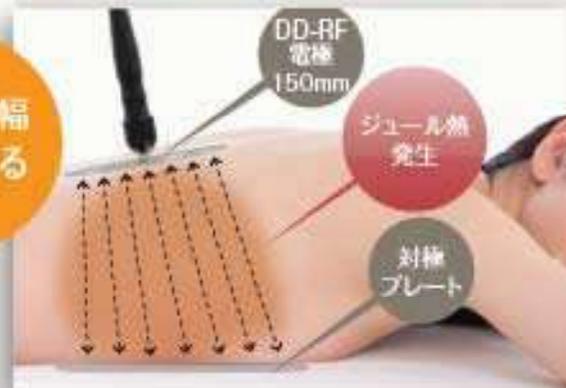

DD電極から放射された高周波はダイレクトに大容量に熱を発生させプレートから大きく戻ってきます。RET・GETともにより深く、早く、ジュール熱を多く発生させます。

施術の幅
広がる

【DD-RF方式】

DD方式により大サイズ電極を自由に扱うことを可能にしました。従来、大容量の電極はインピーダンスのコントロールが難しく安定した熱源として提供は出来ませんでした。しかしデジタルコントロールシステムにより安定した熱源に変換し、大容量の高周波をダイレクトに放射し、深く広くジュール熱を発生させることが出来ます。同サイズの電極とプレートにより熱源を100%無駄にすることなくその結果、スピード、パワー、熱容量も各3倍以上なダイナミックなRFとして使用が可能となりました。



RAFOS DD-RFだからできるスピード & 最高効率施術

効果のある施術

RAFOS Premium だからできる 3 役での相乗効果!!
それは脂肪細胞を「燃焼」「分解」「運搬」の流れにあるのです。

DD効果

メガ深部

超燃焼

DD-RF
Dynamic Direct Radio Fr


DD-RF 電極 150mm



RF効果

深部から燃焼し、脂肪細胞の分解を促進します。

燃焼 RET方式
深部から燃焼し、脂肪細胞の分解を促進します。

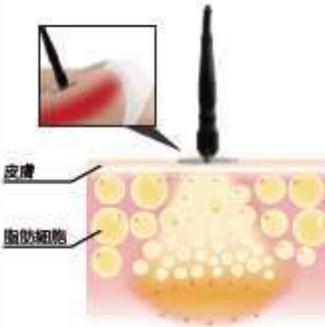

Vacuum&Roller効果

エッジをたてて脂肪細胞を分解、バキュームやローラーなどの同等の効果が期待できます。


分解 CET方式の電極
エッジをたてて分解、ドレナージュをしていきます。



Drainage効果

燃焼分解された脂肪をドレナージュ、排出していきます。

運搬 CET方式
燃焼分解された脂肪をドレナージュ、排出していきます。

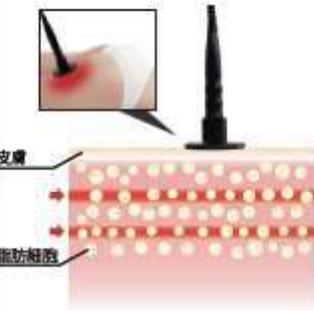



DD-RF

ダイナミックダイレクトRF

規格外!! 燃え方が違う!

DD-RET

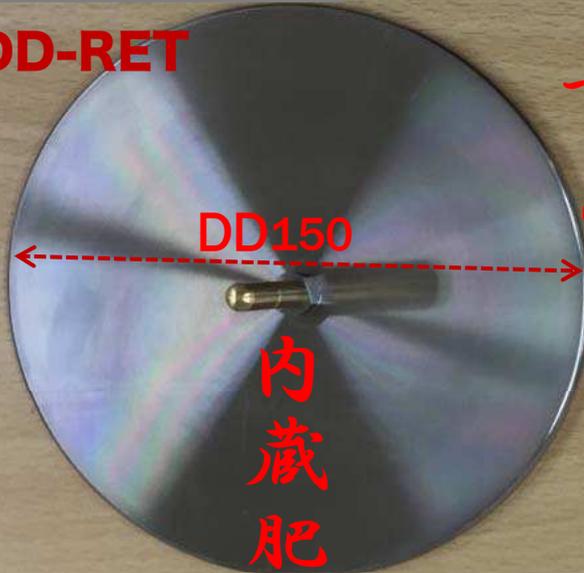


内蔵肥満

早い! 簡単! 技術いらず!
5分でコミット!



冷えムクミ一発改善用

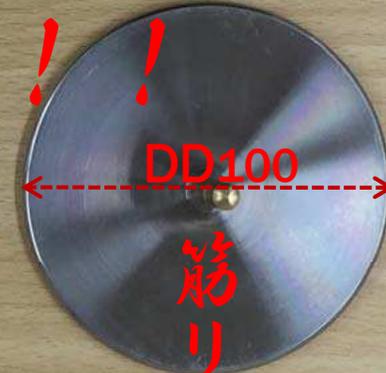

筋リリース・ダメージ用



DD-CET



満汗ビツンリ用



圧倒的メガサイズであり動き
さなくても施術が可能です。

いままでのRAFOSがバリューアップして登場!

従来のRAFOS Premiumに革新的DD電極が登場。従来のRET電極と比較してもDD電極は約3倍の「スピード」と「パワー」と「熱容量」を実現しました。大容量DD電極は150mm、120mm、100mmが追加され、RET方式とCET方式双方で装備されました。圧倒的なパワーで施術が可能となります。短時間で最効率を実現したDD-RF方式で、従来の機器にもご使用が可能です強力なエレクトロード、DD電極が「新登場」しました。

DD-RF
ダイナミックダイレクトRF

規格外!! 燃え方が違う!




内蔵脂肪撃退用



5分でサイズダウン

冷えムクミ発解消用

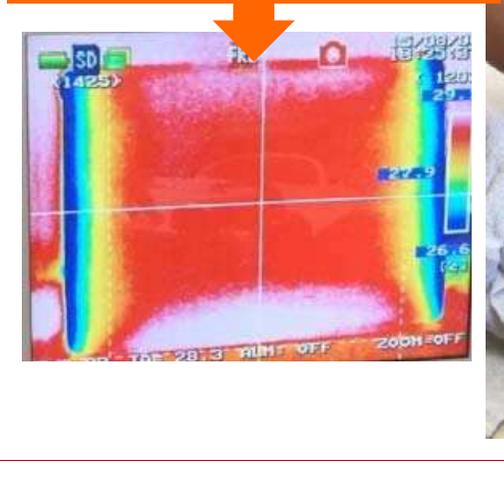

5分で超深部加温

筋リリース用







圧倒的メガサイズであまり動かさなくても施術が可能です。

5分で筋ほぐし

ハンドセラピー用



従来の電極は電極のエリアでジュール熱を発生させ、施術と同様に動かす事で効果をキープしてきました。特にハンドセラピーとの併用に効果を発揮します。

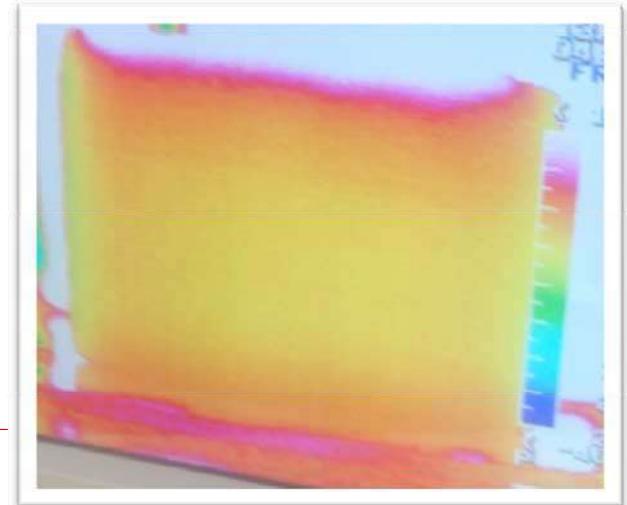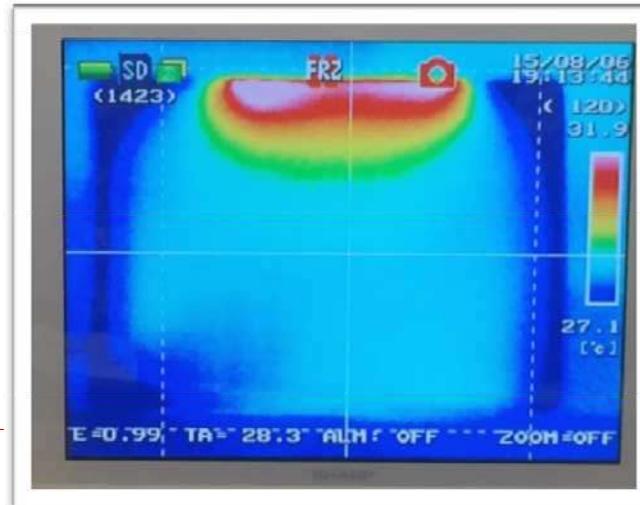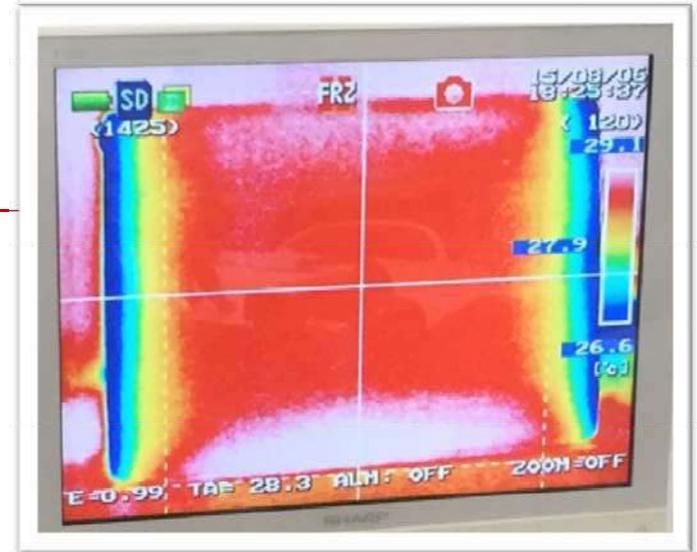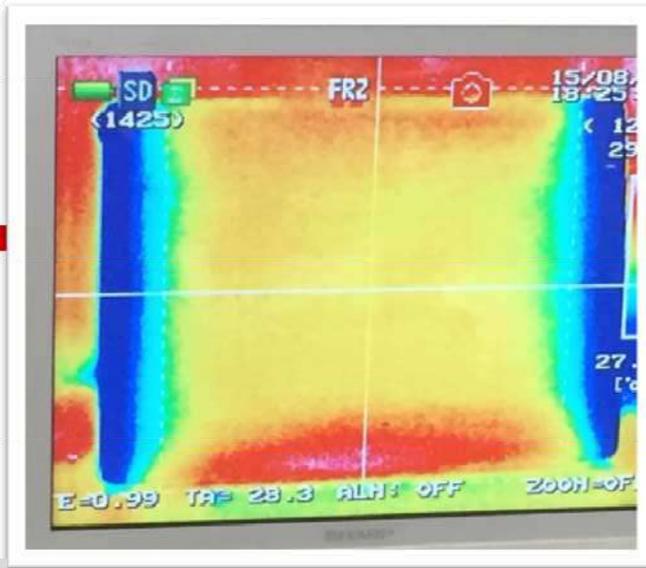

RAFOS Premiumの機能性

RAFOS Premium の機能性①

RAFOS Premiumは他の高周波温熱機器にない機能と性能を備えています。

あらゆる部位に対応できる豊富な電極 (RET電極 3種類 / CET電極 5種類)

RAFOS Premiumはあらゆる部位に対応できるように電極の種類が豊富になっております。



RET電極

CET電極

0~99%のパワーボリューム設定 (詳細な温度対応可能)

高周波の熱源の体感是人それぞれ違います。皮下脂肪の多い方、冷えの方それぞれですがRAFOS Premiumは1%ずつパワーを上下することが可能で、お客様の体質や体型、又施術部位や内容により微調整が可能です。お好みの温度、施術方法に合わせ自由自在にスピーディーに変更可能です。



施術に合せた高周波出力プログラム (6モード)

RAFOS Premiumは6つの出力プログラムが選択できます。連続に高周波を放射するモードと出力のON/OFFのサイクル時間を選択可能なモードがあり、それぞれの施術内容により詳細で効率の良いプログラムを選択できます。

機能	方式	モード	プログラム
AUTO (TEMP設定)	CET ONLY	MODE Cont.	ON
MANUAL (INT.設定)	CET RET MULTI	MODE Cont.	ON
		MODE 1	0.7sec ON 0.3sec OFF 0.7sec ON 0.3sec OFF
		MODE 2	0.5sec ON 0.5sec OFF 0.5sec ON 0.5sec OFF
		MODE 3	0.4sec ON 0.6sec OFF 0.4sec ON 0.6sec OFF
		MODE 4	0.3sec ON 0.7sec OFF 0.3sec ON 0.7sec OFF

※ AUTOモードはCET方式のみ、使用が可能です。

RAFOS Premium の機能性②

RAFOS Premiumは他の高周波温熱機器にない機能と性能を備えています。


立ち上がり10秒の高速熱到達 (短時間施術可能)

RAFOS Premiumはスタートレベルを60%に設定しており、立ち上がりを約10秒で可能としました。従来数分かかった温熱をすぐに体感出来ることによりお客様にも十分ご満足していただけます。あらゆる施術に対応できるようになり、特に部位ごとの施術を短時間で効果を上げることができるようになりました。



電流防止システムによる安全性 (ノンスパーク)

RAFOS Premiumの最大の特徴は元来高周波にありがちなスパークを極力削減しました。プローブ側の信号と本体側のシグナルのやり取りでプロテクションしていきます。マニュアルに沿って施術をしていただければ、どなたでも簡単かつ安全にご使用いただけます。

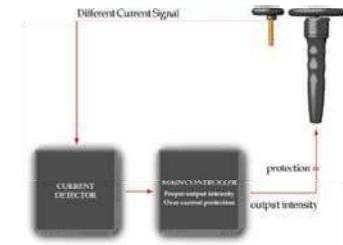

優れた熱制御と静音性

RAFOS Premiumは機器本体内の熱源を極力最小限にとどめるために基板構造をデジタル化し、内部構造内にエアフロー(空気の流れ)を確保しました。その結果、冷却ファンが1個で優れた静音性と熱制御を実現しました。



赤外線センサーによる自動温度関知システム (温度設定可能)

RAFOS Premiumはプローブ側に自動温度感知センサーがついています。初心者の方や施術内容によって温度を一定化したい場合、温度設定が可能です。より安全に簡便に利用が可能でRAFOS Premiumは施術者を選びません。



RAFOSの導入運営ケース

高周波温熱による様々な効果・効能があるので用途が広がります。

FACIAL

皮膚再生促進

コラーゲン層再生

小顔効果

しわ

弾力アップ

メラニン色素分解

しみ・黒じみ

キメの整え

顔筋肉の緊張緩和

コンディショニング

コンディショニング

自律神経の改善

冷え・むくみ

免疫機能の向上

血行促進

新陳代謝の活性化

疲労回復の促進

不眠

便秘

BODY

脂肪の分解・燃焼

スリミング・ダイエット

セルライトの軟化

サイズダウン

代謝促進

ドレナージュ

肌のツヤ・ハリ

引締め・ボディメイク

他機種との相乗

「FACIAL」を目的とされた運営をされる場合

STEP 1 FACIAL

料金例

10分 2,000円

20分 4,000円

+

施術

回数券:10,000円 / 10分 6回分

高周波温熱による効果・効能

皮膚再生促進

コラーゲン層再生

小顔効果

しわ

弾力アップ

メラニン色素分解

しみ・黒じみ

キメの整え

顔筋肉の緊張緩和

「コンディショニング」を目的とされた運営をされる場合

STEP 2 コンディショニング

料金例

RAFOS温熱 上半身プログラム

上半身のラフォス30分
通常/5,000円
初回お試し価格/3,500円

RAFOS温熱 下半身プログラム

下半身のラフォス30分
通常/5,000円
初回お試し価格3,500円

RAFOSコンディショニング全身プログラム

全身ラフォス60分
通常12,000円
初回お試し価格/7,000円

高周波温熱による効果・効能

コンディショニング

自律神経の改善

冷え・むくみ

免疫機能の向上

血行促進

新陳代謝の活性化

疲労回復の促進

不眠

便秘

「美容」を目的とされた運営をされる場合

STEP 3 BODY

料 金 例

ラフォス全身60分+ EMS30分
通常/14,000円
特別価格/12,000円

体質改善コース(腹部or背部)30分
通常/6,000円

お腹くびれコース40分
通常/8,000円

ラフォス全身コース60分
通常/12,000円

ラフォスフェイシャルコース
(首~デコルテ~頭)
通常/6,000円

ラフォス全身90分+ EMS30分
通常/18,000円
特別価格/15,000円

冷え性改善コース40分
通常/8,000円

フットすっきりコース50分
(お腹ラフォス10分+ フットラフォス50分)
通常/8,000円

ラフォス全身コース90分
通常/18,000円

ラフォスフェイシャルコース
(おでこから頭皮+ EMS30分)
通常/4,500円+ EMS3,000円

【回数券】

RAFOS:50,000円 / 60,000円分
EMS:30,000円 / 35,000円分

高周波温熱による効果・効能

脂肪の分解・燃焼

スリミング・ダイエット

セルライトの軟化

サイズダウン

代謝促進

ドレナージュ

肌のツヤ・ハリ

引締め・ボディメイク

他機種との相乗

導入時の収益シミュレーション

RAFOS Premiumを導入した際の1日の収益と投資回収期間を表にいたしました。

話題のアイテムを導入することで新規顧客が増えています。

高周波温熱機器(ラジオ波)を広告に掲載すると**新規顧客の獲得**に期待ができます。**いままでのハンドマッサージにRAFOSを加えたプログラム**を行なうことで、相乗効果があり、その結果をHP又は広告に掲載することで集客効果の増加に繋がります。

実感できる効果でリピーターの獲得が見込めます。

実感できる効果の深部加温の体感が良いことで、施術後の満足度が非常に高く、**リピーターを獲得**できる店舗が増えています。リピーターの囲い込みが安定した収益になります。

コストパフォーマンスに優れたRAFOSだから回収率が高い。

高周波温熱(ラジオ波)の中でも優れた温熱で体感が良く、さらに多機能で安全性が高く低価格。RAFOS Premiumだからこそ**投資回収期間が短く**、さらに売上の増加を見込めます。

2,000円/10分

1台あたりの収益予想一覧 ※ 25日/月 稼働での計算

(FACIALを主とした場合)

1日顧客数	月間顧客数	顧客単価	月間売上金額	年間売上金額	投資回収期間
10人	250人	4,000円	1,000,000円	12,000,000円	約1.8ヶ月
15人	375人		1,500,000円	18,000,000円	約1.2ヶ月

1台あたりの収益予想一覧 ※ 25日/月 稼働での計算

(コンディショニング・BODY美容を主とした場合)

1日顧客数	月間顧客数	顧客単価	月間売上金額	年間売上金額	投資回収期間
3人	75人	10,000円	750,000円	9,000,000円	約2.4ヶ月
5人	125人		1,250,000円	15,000,000円	約1.5ヶ月
10人	250人		2,500,000円	30,000,000円	約0.75ヶ月

RAFOS MENU



RAFOS Premium

SEIKOSHA
Beauty Spa Solutions

THERAPY menu



ボディコントゥアリング - 超痩身セラピー -



コントゥアリング(contouring)とは「彫刻」を意味し、陰影を利用して立体的な小顔を作るというメイク法の一つです。
弊社では、RAFOS Premiumとその関連商品を効果的に組み合わせ、BODYコントゥアリング(超痩身セラピー)としてお客様に理想的な体型をお届けするセラピーメニューをご提案いたします。

1 RAFOS

DD電極の任意的スピードと熱容量（通常の3倍）で、身体を深部まで温めます。
そして、DD電極とRETで深い層から加熱、CETで分解→運搬し、体外に脂肪を排泄していきます。

加熱
DD-RET & RET電極
深部から加熱し、脂肪細胞の
分解を促進します。


分解
CET電極
エッジを充てて分解、ドレ
ナージュをしていきます。

運搬
CET電極
燃焼分解された脂肪をドレ
ナージュ、排出しています。

2 PPC OIL



PPCオイルは大豆から抽出されたホスファチジルコリン（皮下脂肪分解）という成分が入っており、オイルを身体の気になる部分に塗布するだけで経皮吸収され、体内で41℃まで上昇し脂肪を分解します。RAFOS施術後に塗布することで、脂肪燃焼の持続性をサポートし、より多くの老廃物を排出してくれる効果が望めます。

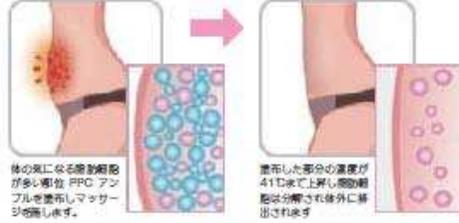

3 CANAL 凹凸ベルト



血行促進と体温上昇



CANAL凹凸ベルトは柔道整復術で「帯状代用器」として用いられており、巻くだけで体温を上昇させてくれます。通気性の良い独自の形状と、簡単に使用できる利便性から、ご自宅でのセルライトケアにもご使用いただけますが、施術直後に使用することで、温まった体温をより長い時間維持させることができ、凹凸形状がつつ先行促進の効能がコリの解消・肌荒れの軽減・セルライトへのアプローチといった効果を付加してくれます。



ホームケアにもご使用いただけます

施術後に再度PPCオイルを塗布いただく、さらに痩身効果が望めます。
深部温度が上昇している状態でご使用いただくことが望ましいですが、ご自宅でのセルフケアとして、お風呂上がりなどの体温が上昇している状態でご使用いただいても効果が体感できます。さらに、成分のホスファチジルコリンには安眠を促す効果もあり、セルフマッサージの後もさらに塗布してそのまますみいただけます。プロテインを併用いただくことで、ホームケアダイエットを効果よく行えます。



フェイシャルコントゥアリング - 超美顔セラピー -



立体的な小顔を作るメイク法の一つとして有名なコントゥアリング(contouring)ですが、弊社では「フェイシャルコントゥアリング」と称し、RAFOSの施術によりお客様本来の御顔をより美顔に近づけ、メイクを一層引き立たせるフェイス専用のセラピーメニューをご提案いたします。

1 RET & CET & CONE

たるみ・シワの解消

肌に張りを出すコラーゲンは年齢と共に生成量が減少し、さらに紫外線を浴びることで本来持っているコラーゲン量も減少してしまいます。この変化によってコラーゲン生成の代謝が悪くなった肌は、徐々に弾力を支えることが出来なくなり、これがたるみやシワの原因となります。RAFOSによるトリートメントは、奥深くから肌の再生能力の作用に働きかけ、たるみとシワの改善を行っていきます。



2 Multi Probe


リフトアップ・引締め

RAFOS Multi Probeを使用してリフトアップを行います。再生作用が活性化された肌に高周波によるジュール熱で深部加熱を行い、血行促進、むくみ・老廃物を排出し、代謝アップを図ります。そしてコラーゲン・エラスチンの生成を促し、くすみのない引き締まったハリのある肌に導きます。針やメスを使用せずにそれと同等の効果が期待できる施術法で、痛みやダウンタイムもなし快適なスキントリートメントが可能です。



3 ヒートショック

RF技術を最大限に生かすヒートショック電極により、エネルギーが電磁波となって放出され、施術部位をさらに温めコラーゲンの変成・収縮を促します。同時にタンパク質を刺激することで真皮に新たなコラーゲンが生成され、皮膚表面と皮下脂肪のコラーゲン繊維が引き締まり、肌にハリがでます。

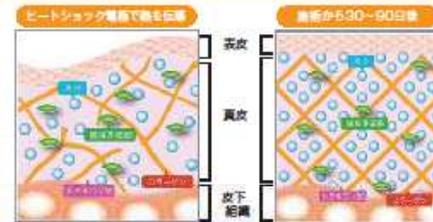

Magnifique Facial Mask (パック)



美容液の施術を終えたお顔の皮膚には、最後にフェイスマスクを付けてあげることで、肌のハリが美しく輝きます。弊社で扱っている「Magnifique Facial Mask」は、天然の成分をベースにしており、温風の力が持つ治療効果で毛穴をキレイにし、保湿成分のパパイヤやセージ、ローズマリーの成分が、お顔の色を明るく保ってくれます。フリンガー機能、ハリを保つマスク機能、そして美容液の機能を兼ね備えたオール・イン・ワンのフェイスマスクで、ご自宅でご使用いただくことも可能です。



深温美療 - 体温1℃アップセラピー -



「加齢とともに体重が増え、腰や膝に負担が増えた」「冷え、むくみ、肩や腰のコリがすっきりしない」。
 更年期や不妊症として一括りにされたお客様がカラダの不調を訴え、骨格・整体・鍼灸院様に多数来院されています。
 深温美療とは「カラダの内から美しく健康に」をテーマに、このようなお悩みを持つお客様に、「美容」と「治療」の両面から体質改善を目指していただく深部加温セラピーです。



体温を上げて免疫力をアップ

体温が1℃上がると免疫が30%変わる、と言われていますが、どのようにしたら体温を上げることができるのでしょうか？

深温美療では高周波RAFOSを用いた、イオン断衝突から発する「ジュール熱」を利用することで、奥深い筋層、内臓からカラダの外に向けて熱を伝導していきます。高周波によるカラダの中からの熱伝導は非常に冷めにくい特徴があり、上昇した体温を持続させることは自律神経改善や血行促進・循環効率を向上させ、体内に溜まっている「むくみ」「老廃物」を排出し、結果「瘦せやすい体質」「病気になりにくい体質」に変えていく効果が期待できます。

深温美療セラピーは数回の施術で「今までと何か違う」「カラダが楽」など体質の変化に驚くお声を多数頂戴しており、90%以上のお客様がリピーターになっていただいています。

1 RAFOS DD-RF



従来高周波セラピーは深部加温と言われており、カラダを中から温める「脂肪」「筋」「骨」の順生に大変効果が高い施術と言われていました。特にRET（シルバー）電極は深く広く透熱を広げ、深層筋に作用します。DD電極（DD-RF方式/Dynamic Direct Radio Frequency）は高周波の最大パワーを引き出すために電極サイズをプレート板とは球面サイズの150mm, 120mm, 100mmのRET, CET電極を断衝突から比べ熱容量の3倍以上、温まるスピードも半分以下を実現しました。しかもデジタルコントロールシステムにより安定した熱源として安全・簡単に取扱うことが出来ます。

2 CANAL 凹凸 PAD



- 血行を促進します
- 体温上昇1℃
- 筋肉の疲れを取る
- 筋肉のコリをほぐす
- 浮腫の軽減


CANALは古代江戸時代からの整復術で、その療法を取り入れたCANAL凹凸PADは、突起形状と独自の編み方からの製法により、指圧代替薬として「血行を促進」「筋肉をほぐし」「浮腫を軽減」します。

CANAL療法はベッドに敷いて置いていただくだけ、腰に巻いていただくだけでご利用いただけます。

凹凸形状で血行を促進します。（指圧代替効果）



寝るだけで体温が上昇します。

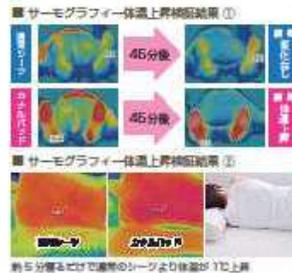

ネックアップコンディショニング -頭皮&首筋ケア-



ネックアップコンディショニングは、頭部からネックラインにかけて総合的にケアを行う皮膚細胞活性化セラピーです。従来のヘッドセラピーでは、頭部表情筋がほぐされることで首の疲労・コリを際立たせてしまうというケースが存在しました。それを改善するため、頭皮からリンパの流れを伝ってネックラインまでを同時にケアすることで、さらにリラクゼーション効果を高めたメニューになります。

① ネックラインケア



CET電極30mmを使用して首筋、髪の生え際のリンパドレナージュを行います。細かくマッサージしながら首筋の筋力をほぐしてあげることで、頭部のみがほぐされたときの違和感を軽減するとともに、代謝が向上した際に排出される老廃物の出口を作ってあげます。



② RAFOS Head Probe

CET電極ヘッド用を使い、皮膚細胞を中から活性化し健康な頭皮細胞の誕生を促進します。頭部の丸みにしっかりとフィットするようにデザインされた専用の電極で、車も髪に通りやすく、トリートメントの効果を向上させます。硬くなりがちな頭皮ですが、頭部表情筋を柔らかくほぐしていきながら血行を促進し頭皮を若返らせていきます。



CET電極 ヘッド用の構造

CET電極ヘッド用は、頭皮にまんべんなく当たるように3本のアングルがらつめのブロックに密着して並んでいます。内蔵の5車は外周の10車より長く伸びており、この2つの構造が頭部の丸みをカバーしてくれます。



RFヘアセラム

ヘッドプローブをご使用の際はBODYクリームではなく、専用のヘッドセラムをご使用いただきます。ジェル＆ウォーターのハイフでサラッとしており洗髪の必要もなくすぐ乾きます。頭皮・髪を潤熟セラピーセラナゾーするセラムです。

③ denovo3+ 美容器



denovo3+のトリートメントケアで、ほぐされた頭部からネックラインにかけて全体的なマッサージをしてあげます。LEDセラピーによる毛髪の再生・成長の促進と、頭皮の改善、イオン浸透による肌の保湿・保潤を促し、同時にカッサ型の先端とバイブレーション機能でデトックスを行いながら、首筋や顔のコリを解消していきます。1台でヘッド、フェイス、デコルテの3部位へのトリートメントが可能で、施術後のホームケアにも活用いただけます。

LED (RED/BLUE)



殺菌・成長促進

イオン導入



導入・活性・浸透

Micro Vibration



微振浸透・浸透

RAFOS THERAPY TOOL

BODY/部分

PPC OIL

(部分痩身オイル)



Phosphatidyl Choline (ホスファチジルコリン) を純粋して PPC、41℃まで加熱し、脂肪の分解、燃焼を促します。他製品と比べ、圧倒的な高濃度 5000PPM 配合。部分痩身に特化した商品です。



1Box
0.1L(100ml)
Cap: 2個

BODY/体重

プロテイン

(超痩身・女性らしいカラダを保つ大豆)



女性には飲みにくかったプロテインを甘さ控えめでミルクティー味、ココア味にした大豆タンパク食品です。必須アミノ酸 9 種類を含み、各種アミノバランスに優れた食物繊維を多く含めました。1食 75 キロカロリーの代替食品としてダイエット・コンディショニングには最適です。

体質改善 カナル凹凸シリーズ(体温1℃アップ/体質改善)

Canal凹凸 Belt
Canal凹凸ベルト

着用時の体感
Canal凹凸 Pad
Canal凹凸パッド

Canal凹凸 Pillow
Canal凹凸ピロー

Canal凹凸 Pad
Canal凹凸パッド

Canal凹凸 Belt
Canal凹凸ベルト

着用時の体感
Canal凹凸 Pad
Canal凹凸パッド

Canal凹凸 Pillow
Canal凹凸ピロー

Canal凹凸 Pad
Canal凹凸パッド

Canal凹凸 Belt
Canal凹凸ベルト

着用時の体感
Canal凹凸 Pad
Canal凹凸パッド

Canal凹凸 Pillow
Canal凹凸ピロー

Canal凹凸 Pad
Canal凹凸パッド

Canal凹凸 Belt
Canal凹凸ベルト

着用時の体感
Canal凹凸 Pad
Canal凹凸パッド

Canal凹凸 Pillow
Canal凹凸ピロー

Canal凹凸 Pad
Canal凹凸パッド

Canal凹凸 Belt
Canal凹凸ベルト

着用時の体感
Canal凹凸 Pad
Canal凹凸パッド

Canal凹凸 Pillow
Canal凹凸ピロー

Canal凹凸 Pad
Canal凹凸パッド

フェース マグネフィークフェイシャルマスク



クレンザー機能、ハリを与えるマスク機能、そして美容液機能が一つになったオールインワン・アイテムです。

磁気力が持つ浴温効果を活かして毛穴をきれいにし、お肌の奥深くへと働きかけるこのマグネフィーク・フェイシャル・マスクは、皮膚ハリアプの強化を助け、手軽にお肌の色を明るくし、肌にハリと美しい輝きを与えてくれる、天然の鉄分をベースにした独自のマスクです。

ヘッド Denovo 3+(美容機器)

頭皮・顔・デコルテ 振動・LED・ION-TONIC



1台で3役、顔、顔、デコルテへの美容機器。業務、ホームケア両方可。



顔コッサ式
顔ハイフレーション
顔LED (PEDAGLUE)
顔イオン導入
顔Tonic (番号・ニック名・クレンジング)

RAFOS 日本総輸入元・販売元
SEIKOSHA 株式会社 創薬社
Innovative Republic
〒101-0081
東京都千代田区三軒三丁目12-7-8 浦見ビル 3F
TEL. 03-3234-1039 FAX. 03-3234-1038
<http://www.seikosha-net.co.jp/> <http://www.rafos.jp/>



RAFOSの導入実店舗

クリニックの使用例

The screenshot displays the website for LIU'S Clinical Spa. At the top, there is a navigation menu with links for 'HOME', 'ABOUT', and 'CONTACT'. Below this is a secondary menu with categories: 'DOCTOR', 'PROBLEM', 'EFFECT', 'EQUIPMENT', 'PRICING', 'BRIDAL', 'FACILITIES', and 'SHOP'. The main banner features a woman receiving a facial treatment with a device, with a red-bordered text box stating: 'ラフォス RAFOS Premium デビュー 従来の高周波を遥かに超えた高周波温熱機器' (RAFOS Premium debut: A high-frequency thermal device that far surpasses conventional high-frequency). To the right of the banner is an image of the RAFOS Premium device. Below the banner is a central menu with three columns: '悩み別メニュー' (Menu by problem), '効果から探す' (Search by effect), and '機械別メニュー' (Menu by machine). The '悩み別メニュー' column lists treatments for facial issues like wrinkles, spots, and acne, as well as body treatments like slimming and cellulite. The '効果から探す' column lists effects such as skin lifting, whitening, and pore tightening. The '機械別メニュー' column lists specific machine treatments like RF radio waves, Hydra, and EMS. On the left side, there are news sections and a '年末年始キャンペーン' (New Year Campaign) banner. At the bottom, there are advertisements for 'Sapho' and 'LIU'S Clinical Spa ショップ'.

体験レポート1

体験レポート2

体験レポート3

体験レポート4

体験レポート5



メディカルエステサロン
六本木・リュウズ クリニカルスパ

〒106-0032 東京都港区六本木 5-17-16

TEL : 0120-84-4199

URL : <http://www.dr.lius.net>

営業時間 : 10:00~19:00 日曜定休

地下鉄日比谷線・大江戸線「六本木駅」3番出口より徒歩5分



ラフオスボディ [脂肪分解・燃焼・ダイエット・代謝促進・引き締め]

効果 脂肪分解・燃焼・ダイエット・代謝促進・引き締め

適応 冷え性・肩こり・むくみ・体質改善をしたい方

高周波とラジオ波により短時間で深く広範囲に深部加温させ内臓脂肪を燃焼させます。

血行促進と独自のテクニックで筋肉・皮下脂肪をほぐし、
むくみ・冷え性改善し代謝を上げ健康的で美しい身体へ導きます。

さらにコラーゲン生成で引き締まったボディラインに。

1週間に1回のペースで1ヶ月続けて頂けると効果的です。

(※効果には個人差がございます。)



RETモード
(深部発熱)
脂肪燃焼/分解



CETモード
(表皮に近い発熱)
老廃物排泄、引き締め

最大の特徴

従来のラジオ波に無かった深部発熱(RET)機能により最高熱到達時間が最速20秒の短時間で

深く広範囲に深部加温が可能最新の温度自動認識機能によりムラなく安心

サービスの詳しい情報は [こちら](#) >

ラフォスボディ 体験レポート



1. カウンセリングと症状確認

VANRIさんはアトピー性皮膚炎を持っているとのこと、通常のカウンセリングとは別に着替えの後、アトピーの症状も診て頂きました。踏傷をするにあたり、脚への負担はないかなど丁寧に確認して下さい、疲れが溜まっている様なので施術後良くなりますよ、とおっしゃって下さいました。

2. RETモード

癒せやすい身体にする為、深部の冷え・筋肉が張っている箇所を中心に温めていきます。



3. CETモード

表面のむくみ・凝っている箇所を丁寧にほぐして老廃物を流していきます。



4. 右足

左脚同様に足底からヒップまで行きます。



5. 前側

高いヒールで長く張った前側のふくらはぎもしっかりとほぐして流していきます。

6. マッサージ

ほぐれた脚を更に美しい脚にするべく、ハンドマッサージで形を整えて終了。



7. 施術を終えて・・・



ミス・ワールド2013日本公式スポンサー企業様、リュウズクリニカルスバさんに行ってきました。

しかも、私の出身大阪でも有名な白髪美容外科さんが、東京で設立されたスバだったので！

今回は、大阪に白髪美容外科さんは無いのですが、大阪州にある「サファイアクリニック&リュウズクリニカルスバ」で施術を受けられます。

今回、私はリュウズクリニカルスバさんで、施術を受けました。著名な方々多く来店される知る人ぞ知る・・・のサロンです。

今回は、下半身、脚を中心にして頂いたのですが…これが目で見てわかるくらい理想的な脚のラインが出て、見違えるほどキレイになったんです。特別な機械で芯から身体を温めて、日頃の疲れ、コリをとって下さったんですけど女性の方はヒールなどほぐすので特に脚の形がコリなどで変わってしまうそうです。

また、私はアトピー性皮膚炎をもっているのですがそんなアレルギーをもっている方にも、その方に合わせた施術をして下さるので安心して受けることが出来ました！毎晩 半身浴後マッサージ、柔軟をしているのですが 今回せっかく理想的な脚のラインに頂いたのでキープ出来るよう、どこぞどんな風にマッサージすれば疲れがたまらないかも教えて頂けると美容の勉強になりました。

体験レポート1

体験レポート2

体験レポート3

体験レポート4

体験レポート5



メディカルエステサロン
六本木・リュウズ クリニカルスパ

〒106-0032 東京都港区六本木 5-17-16

TEL : 0120-84-4199

URL : <http://www.lius.net>

営業時間 : 10:00~19:00 日曜定休

地下鉄日比谷線・大江戸線「六本木駅」3番出口より徒歩5分





ラフォスリフト [小顔・弾力アップ]



効果 小顔・弾力アップ

適応 たるみ、フェイスラインの引き締め

高周波により細胞を活性化させるので身体の中から熱を発生させて内臓や筋肉(深部)を温めるため、冷えやむくみを改善します。さらにリュウズクリニカルスパ、オリジナルテクニックを駆使して筋肉のコリをまぐしリフトアップさせます。熱めのお風呂に浸かっている様な気持ちの良い施術です。

ラフォス施術



マッサージ



ラフォス



最大の特徴は最高熱到達時間が最速20秒の短時間で深く 広範囲で深部加温を行います。高周波の熱により肌真皮層の コラーゲンが変性・収縮されると 修復しようとする自然治癒力により大量のコラーゲンを生成されます。

ラフォスリフト 体験レポート



1. クレンジング

クレンジングをしながら今日の肌状態・顔や首のハリについてカウンセリングしてもらいました。

2. RETモード

身体の中から熱を発生させて、血流を改善できるRETで凝り固まった首や肩の筋肉を緩めていきます。首や肩のハリがお顔のくすみやくすみ原因になってしまうそうです。



3. RETモード

硬く張ったお顔の筋肉も緩めてリフトアップしていきます。

4. 10mm RETモード

更に鼻かみ鼻や目の周りも温めていきます。



5. CETモード

表面の老廃物やむくみを流せるCETで、首から程良い感じにハリとほぐされていくのがわかります。

顔も軽くなってフェイスラインがくっきりしました。とても心地よく眠ってしまいました。



6. CETモード

小さな機械に替えてイタ気持ちいけどハリとほぐされると...パツパツ目になり鼻筋がスッとします。



7. リフトアップ導入 (オプションメニュー)

これは電気(低周波)で美白剤などを肌の深部まで浸透させる機械だそうです。目の下のシワや唇のホクロがブルブルいなるそうです。



8. ハンドマッサージ

首や顔にくっついた熱を残さないよう手でしっかりと温めていきます。程良い力の加減でスッキリしました。

9. 施術を終えて・・・

Before



After



私は浮腫みが顔から出てしまうのですが、電分や水分を摂りすぎた次の日などは目元に出やすく、また来い時期などは血流も悪くなってしまっていたので、まぶたのラインやアゴのラインも変わり別人のような顔になってしまうのがずっと気になっていました。

以前にもエステには何回か通っていて、1回の施術での変化の限界点のようなものを自分で決めてしまっていたのですが、リュウズクリニカルスバさんでフェイシャルをして頂き余り見た目の違いに驚きました！特に写真で撮影してみると一目瞭然！！

アゴのラインがシャープになっていて一回り顔が小さくなって顔のパーツがハッキリと見えてきました！！嬉しいのが、お顔全体のリフトアップもされていて二重の幅が広がり、瞳がぱっちり！！

そして笑うときに、ほっぺがかなり軽く感じられました。フェイシャルと言っても顔だけをマッサージするのではなく背中の上の部分、肩、デコルテ、首筋もかなりリンパを流してくれるので、首が軽くなったのと鎖骨の浮き出方がとても綺麗になりました。

まさかこんなにわかりやすく変わるとは想像出来なかったので鏡で確認した時は本当に嬉しさと感動でした！そして、今まではフェイシャルの次の日は顔がまた少しづつ浮腫みはじめるという感じがあったのですが、1度の施術で2週間以上スッキリ小顔のままだったので、効果の長持ちも日々実感出来ました。

フェイシャルではかなり強く押されるお店もありますが、リュウズクリニカルスバさんは程良く痛み持ち程度の指圧で凝り固まっているツボやリンパを押し流してくれるのでリラックスしながら受ける事が出来ました。

最新高周波RAFOSで
丸顔も凸腹もぐんぐん削られる！
憧れの小顔・くびれが現実には！

モデル歴15年 美を追求した集大成がここに！



La Ruelle (ラ・リュエル)

今回のメニュー
大推薦ポイント①

e-エステ初登場！
最新型 高周波マシン RAFOS！



- 加温スピードが速い！
- 温まりの持続が長い！
- 開発された韓国では医療用のパワーマシン！

国内でも有名美容クリニック等にどんどん導入されはじめています

このマシンが開発された韓国では医療用としての使用しか認められていないというRAFOS。

元々高周波は癌などの腫瘍治療のために作られた機械というだけあって、海外では高周波機器は医療用として使われることがメインなのだそう。

常に「より良いマシン、素材」を求めている佐藤先生が2年前このマシンに出会い、使ってみたところ今まで使っていた高周波温熱機器と比べると「温まり方、結果の出方が全然違う！」と感動し即、導入したのがこのマシンとの出会いだそう。美へのこだわりが強い佐藤先生が惚れたこのマシン！それだけの効果が期待できるということですね！

今回のメニュー
大推薦ポイント②

リピーター率92%!
タレント・モデルが通う恵比寿の結果重視サロン



- オーナーエステティシアン佐藤路先生は元モデルさん！（モデル歴15年）



モニター結果（20代）4回施術

10代から15年間モデル活動を行っていた佐藤先生。その間、自身の美容ケアとしてエステや様々な美容法を行っていくうちに「美容を自分でも学びたい」と思い、

指圧、整体、調整、リフレクソロジー、リンパドレナージュなど様々なトリートメントを学んでいったそう。その美への貪欲ぶりには頭が下がります！

この美の裏側にはそれだけの知識、努力があるんですね。それでも先生は「まだまだですよ。手技は10以下ですから」と謙遜されるのだから、その追求心はとどまることを知らないですね。

7年前にe-エステでも大人気のインディバに出会い、そこから高周波にできるエステトリートメントに集中していったとのこと。友人知人のモデル、芸能人仲間から始まったお客さんは次第に口コミで連日予約が取れないまでに成長。これだけの知識、経験を持った美のプロフェッショナルにトリートメントしてもらったらキレイになれないわけがない！ですね。

step1 カウンセリング&ウェルカムティー



恵比寿駅西口を出て本当にすぐのプライベートサロン。恵比寿駅前という超利便性が良いのにプライベートサロンという店構えなので、入る時からリラックスできるのがやはりプライベートサロンの良いところですね。
迎えてくださったのは代表の佐藤先生。スラリとした長身ですが元モデルさん！お美しい！こんなに美人でずっと人前に出ているお仕事をされていたのに、なぜ真逆の裏方に？

「これまでずっと美を追求してきただけに、女性がどういふところが気になるか、どうなりたいかなどの気持ちが分かるんですね。その自分がどうされたいかを実現できるサロンをつくりたい、たくさんの方に味わってもらいたい。それで実現したのがこのサロンです」とのこと。これだけ美しく、またサロンも予約が取れないくらい大々盛しているのに、先生の向上心には頭が下がります。そして期待もどんでんアップ！どんなトリートメントが待っているのか、早く受けたい！

step2 最新型高周波RAFOS：腹部（レス〜キャバ）



今回のメニューはオーダーメイドということで、施術箇所が違えます。私は一番気になる「**お腹・腰周り**」とたるみ&むくみがちな「**フェイスシャル**」をメインで施術していただくことにしました。（全身や1部位のみ集中などもOKとのこと。カウンセリング時に相談して決めます）

説明通り、一般の高周波マシンよりも温まるスピードが速い！のに驚きました。腹部にプローブを置いてまもなく深部が温まり、次第に全身が温まってきました。まずはレスという深部にアプローチするプローブで腹部〜腰全体を温めていきます。もう片方の手ではリンパに沿って流していき、これがとって気持ちいい！いきなり眠くなってきました・・・zzz その後、キャバのプローブにチェンジし、温まって柔らかくなった骨周りの筋肉、脂肪、をほぐし、流していきます。これもまたとっても気持ちいい！温まったことによって強めの圧で全く痛みはなく、ただただ気持ちいいです！

step3 スペシャルデトックスマッサージ：腹部



たっぷり高周波を腹部〜腰にかけた後はスペシャルデトックスマッサージです。佐藤先生の細い身体から想像できない力強さで指先、手のひら、様々な部分を使いながら身体のコリや詰まりを流していきます。私は下腹部のぼっこり、たるみが一番の悩みなのですが先生曰く「**脂肪やセルライトというよりこれは腸が腫れていますね**」とのこと。腫れている！確かに私はアレルギー（アトピー、花粉症）持ちなので腸が弱いということは知っていたけれど・・・。そんな事前情報をお伝えしていないにも関わらず言い当ててくれるなんてすごい！驚きました。凝りかたまっている部分をほぐし流されたことで身体が軽くなっていき、またもや眠りに落ちそうに（笑）。

step4 クレンジング⇒最新型高周波RAFOS：フェイスル〜首（レス〜キャバ）



次に個人的お悩み第二位のフェイスルです。あごのライン、首からこめかみなどの凝っている部分もしっかりレスをかけていき温まりとっても気持ちいい！顔や頭がどうしてもこわばりやすいのですが、温められることによって深部の筋肉もゆるんでいくような感覚に。その後、細いプローブのキャバ（高周波フェイスルでこの細いプローブを扱うのは難易度が高いらしく、私自身も初めて体験しましたが、これはクセになりそう）で顔のリンパやツボを刺激しながら骨に沿って脂肪や老廃物をまさに削るように圧をかけながら流していきます。

Before & After



憎きゼイ肉に
さよなら!!
(感動!)



下腹部の
ぽっこり凸腹が
いなくなった!



しなやかな
くびれが現れた!



顔が一回り
小さくなった!!
肌がワントーン
明るくなった!
視界が明るく
なった!



スポーツ・接骨

治療

接骨院での使用例

【使用目的】

- ・施術前に筋緊張緩和の促進
- ・温熱効果で治癒力を高める
- ・代謝を促進させ自然治癒力を高める
- ・痛みの緩和
等々



接骨院

高周波の施術をしていると痛みの緩和や骨の癒着に即効性があるように感じられます。自律神経のバランスの回復や筋硬度も温熱効果により柔らかくなり指が入りやすくなります。深部加温は筋肉のコリにも効果があります。

久米 信好
Nobuyoshi Kume

東京有明医療大学准教授
久米鍼灸整骨院院長



深部加温で痛みの緩和、筋の凝り・・・



日本ゴルフツアーのオフィシャルアスレチックトレーナー成瀬克弘



【男子トーナメント】 日本ゴルフツアーのオフィシャルトレーナー
成瀬克弘

RAFOS Premium

プレジャーのフェイスブックに、高周波を掲載してみました。
利用したプロは、尾崎直道、丸山茂樹、深堀圭一郎、近藤共弘、川村昌弘、宮里聖志、飯合肇、平塚哲二、矢野東、久保谷健一、etc で、その効果に皆、驚いてます。ありがとうございます 成瀬



今週、国内はオープンウィークです。そこで、今回はフィットネスカーで使用させていただいている秘密兵器をご紹介します。高周波治療器「RAFOS mini」です。高周波を使い身体の深部に熱を発生させることで、疼痛の緩和や可動域を向上させることができます。深部を温めることで身体はリラックスするので、寝てしまう選手も多数です。一度受けた選手からは、リクエストが出るほど気持ちのよい受け心地です。写真は川村選手。爆睡していました。



動画



4月19日

【男子トーナメント】

今シーズンからフィットネスカーに導入されました『RAFOS Premium』。

早速、今週の東建ホームメイドカップでも大活躍でした!!
プロゴルファーの多くが悩まされる慢性的な肘や腰の痛みや、寝違えによる頰の痛みなど様々な症状に対応出来る、今までに無かった素晴らしいマシンです!!











京都産業大学陸上競技部コーチ小室 輝明 <KOMURO Teruaki>

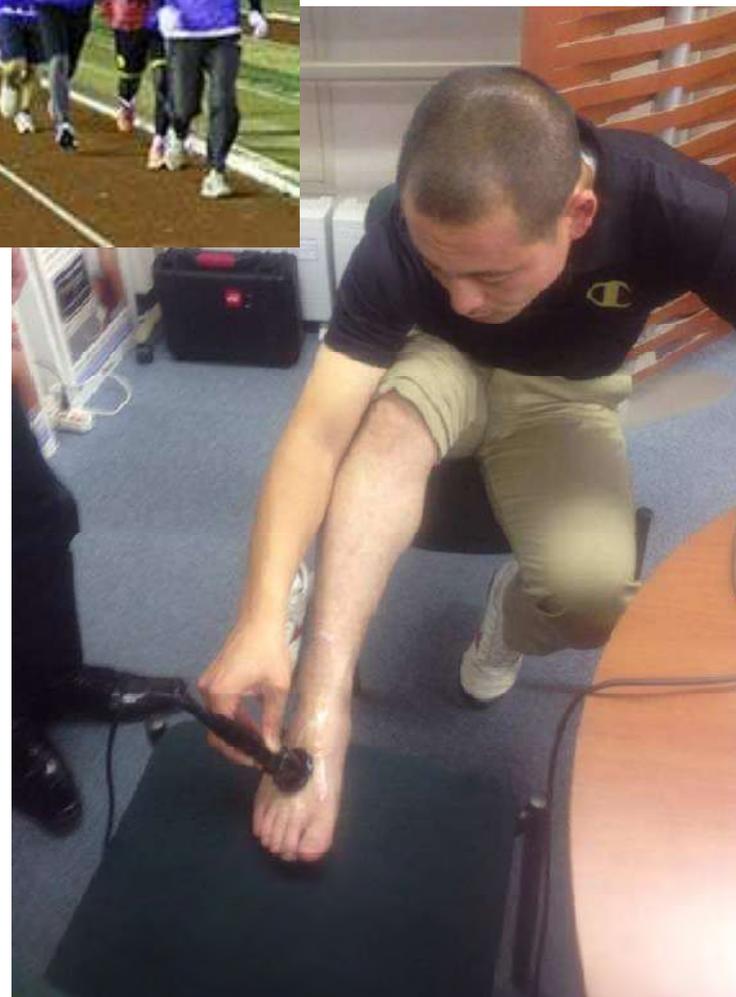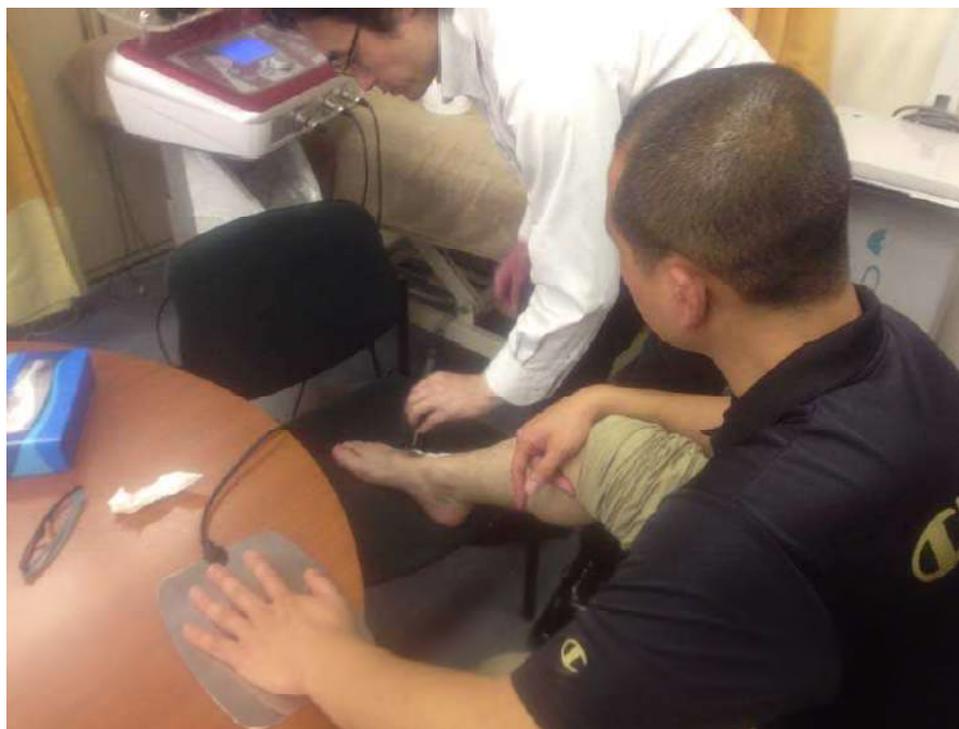

コンディショニング①

加圧ジムでの使用例

トレーニング前

RAFOS

- ・可動域拡大
- ・筋緊張の緩和
- ・ストレッチ



トレーニング

加圧トレーニング



トレーニング後

RAFOS

- ・筋疲労の回復
- ・血行促進



加圧ジム



加圧スタジオ P-STYLE
秋山加圧トレーナー

加圧+RAFOSで 女性客大人気!

お客様は恵比寿という立地から女性客が多く、加圧トレーニングとストレッチを目的とされる方が多く来てくださっています。加圧トレーニング後にRAFOS Premiumの施術を行うと筋疲労の軽減や温熱効果による心地良さもあってお客様の反応が非常に良く、特にエクササイズ翌日の肌の調子が良いという声が多く聞かれます。また、カラダが堅くストレッチが苦手というお客様にはRAFOSの施術をしてからストレッチを行うことで可動領域も広がります。さらに加圧トレーニング前にRAFOSを使って筋肉が硬くなってしまっている部分への施術を行うと、エクササイズ効率アップし、ダイエットや筋力アップに対しての効果も高まっているように感じます。トレーニングだけでなく、深部加温の施術は「気持ちいい」の一言で、今ではRAFOSだけのお客様も増え始めました。加圧+高周波RAFOSの新たなお客様が増えつつあります。

コンディショニング②

スポーツジムでの使用例

トレーニング前

RAFOS

- ・可動域拡大
- ・筋緊張の緩和
- ・脂肪の分解促進
- ・脂肪の燃焼促進



トレーニング

ストレッチ
トレーニング



トレーニング後

RAFOS

- ・筋疲労の回復
- ・コンディショニング



スポーツジム



SAWAKI GYM
澤木トレーナー

毎日のトレーニングとインストラクターの仕事で日々カラダを動かす、筋肉の疲労がピークになることがあります。ケアのためにマッサージや睡眠を心がけていますがRAFOSを体験して驚いています。まず、可動領域が広がり、回復が早くなった気がします。しかも深部温熱が筋に直接働いているような感じがしてトレーニング後のクールダウンに最適です。加温することで発汗もしやすくなり代謝もアップします。ボディビルの大会

に出場予定でトレーニングを積んでいますが、最後の追い込みで、RAFOSの力を借りたいと思います。今後パーソナルトレーナーの仕事の一部としてトレーニングの指導だけでなく、このような高周波セラピーも出来るようになればいいと思います。サウナや岩盤浴などの外からの温熱と違い深部加温はダイレクトにコンディショニング維持に大変効果的です。

過度なトレーニング後の
深部温熱ケア