

SONOCARE Before/After



リフトアップ・引き締め / 3回

しわ / 4回



浸透 / 1回

ニキビ / 3回



ニキビあと / 5回

Body Treatment / 1回

モード	プログラム No'	施術内容	施術箇所	レベル	トリートメント時間	トリートメント頻度	回数
Face	1	リフトアップ・引き締め	Left Right	Level 6	18 min	週に1~2回	8~10
	2	しわ	Left Right	Level 6	12 min	週に1~2回	8~10
	3	保湿	Left Right	Level 4	12 min	週に1~2回	8~10
	4	浸透	Left Right	Level 3	6 min	—	1
	5	ニキビ	Left Right	Level 3	12 min	週に1~2回	8~10
	6	鎮静	Left Right	Level 2	12 min	週に1~2回	8~10
	7	ニキビあと	Left Right	Level 4	18 min	週に1~2回	8~10
	8	アザ	A L L	Level 2	6 min	—	1~
Body	9	引き締め	A L L	Level 6	15 min	—	—
	10	保湿	A L L	Level 4	10 min	—	—
	11	浸透	A L L	Level 3	10 min	—	—

仕様	製品スペック
サイズ	本体 428(w)×370(D)×370(H)mm
重量	6.7Kg
周波数	1,3,10Mhz
強度	Max 3W/ cm ²
電圧	110V or 220V (Free Voltage)



SONOCARE/ 高密度超音波

付属品



BODY プローブ

FACE プローブ



次世代高密度ナノ超音波
みずみずしく潤った 水をはじく弾力肌へ

sonocare

Moisture Lifting Therapy



次世代高密度超音波で水を弾く肌！水艶肌リフティング！！

ナノマッサージで Baby Skin 肌へ

産まれて間もない Baby Skin 肌を可能にしたモイスターリフティングセラピー「Sonocare」とは最新の高密度超音波美容機器で、痛みやダウンタイムがありません。次世代の安全尚効果的な HIFU として各国で人気のトリートメント機器です。Sonocare の特徴は 1Mhz・3Mhz にプラスして、10Mhz の高密度超音波を搭載。組織の代謝に関する最新研究で注目されている細胞外マトリクス (ECM) が超音波から受ける影響に着目しました。老化した細胞の動きに高密度の振動エネルギーを与えて、肌に弾力を持たせ、周波数を変更することでシワ、たるみ、ニキビ、アトピー、引き締めなど、様々な症状の原因に効果的にアプローチします。さらに、コラーゲンを増殖させ、肌の保水力を上げ、引き締め、生まれたての肌のような健康的で若々しい肌を作ります。「Sonocare」による超音波照射は皮膚に強い刺激を与えることなく、細胞を活性化致します。

1 皮膚の弾力 UP

2 シワの改善

3 水艶肌保湿効果

4 プリットした Baby Skin 肌

5 プリットした唇

6 お肌のタイトニング (引締め) 効果

7 コラーゲンの増殖

8 肌トーン UP

9 浸透と化粧のりの改善

10 色素沈着の予防

BODY プローブ

FACE プローブ

Getting Dry? Supply Moisture

Multiwave Ultrasound

※痛みが苦手な方、敏感肌の方にもお受け頂けるお肌に優しいトリートメントです。HIFU やレーザーのような技術は不要です。

SONOCARE 効果

◆ しわ・深いしわ Wrinkles & DEEP Wrinkles

しわや深い固定的なしわ (ほうれい線等) を改善します。

◆ 引締め Skin & Tightening

弾力をアップさせお肌を引き締めます。

◆ 肌再生・にきび Skin rejuvenation

日焼けや肌荒れ、乾燥肌の改善
皮膚が弱い人、その他炎症を抑える必要がある方にも施術可能です。

◆ 超音波美容成分浸透 Phonophoresis


化粧水や美容成分を浸透させます。
皮膚の細胞間隔を広げてやわらかくしますので、他の様々な施術の助けとなります。

◆ リフティング Connective tissue lift

二十顎やほうれい線、大きなたるみにもアプローチができます。



SONOCARE 使い方 1Mhz&3Mhz と 3Mhz&10Mhz の組み合わせ

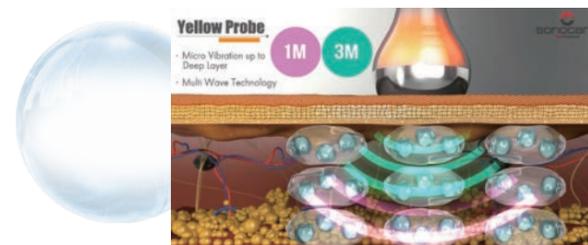


1Mhz, 3Mhz は深層 (30mm) 謙虚な力で筋肉層に物理的な刺激を与えます。



3Mhz, 10Mhz は真皮層 (3mm) に集中する。表皮及び真皮層における効果的な熱エネルギー (47℃) を送達。

SONOCARE シングル及びコンビネーション効果

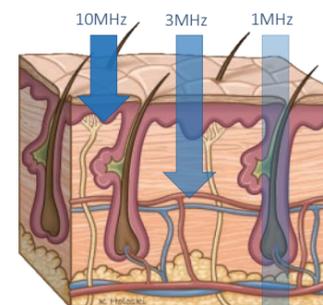

【1Mhz】3cm を超える深部、血流と酸素供給の有効


【3Mhz】1cm 以下、筋層を効果的に刺激

【1Mhz+3Mhz】異なる周波数の圧力差により筋層をより効果的に刺激

【10Mhz】表皮層 (表皮、真皮)

【3Mhz+10Mhz】マルチエリアはナノ細胞マッサージ効果

SONOCARE 10MHz の熱エネルギー供給

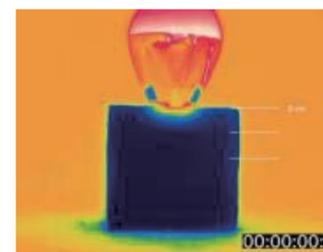

SONOCARE の最大の特徴は、10Mhz の周波数です。3mm 以下に届き、表皮層 (表皮、真皮) を効果的に刺激します。極めてわずかな振幅を起こし、これは細胞膜にまで広がります。振幅はわずかな 1.8mm なので、**ナノマッサージ効果**と呼ばれています。この振幅は細胞だけでなく細胞内の**タンパク粒子も刺激**することが可能で、**皮膚細胞の再生**にも最も効果があります。また 1Mhz の超音波振幅は 0.018μm とされ細胞 10μm より小さく細胞膜 0.005μm より大きいです。10Mhz 超音波は 0.005μm より小さく 0.0018μm で更に微細なマルチ振動により効果的と言われています。

SONOCARE テクノロジー

SONOCARE はマルチ wave 技術を用いて 10MHzNano 超音波を発信し、胞膜構造の細胞増殖と回復および肌の弾力改善保湿のための最新テクノロジー美容機器です。



1秒あたり 100万~1000万回の振動による細胞刺激



グリコサミノグリカン (GAG) 再分配
- スキンハイドレーション (保湿) -



コラーゲンクロスリンクリモデリング
- 肌弾力改善 -



イオン濃度コントロールによるサイトカイン発現
- 細胞の増殖と回復 -

消耗品

商品番号 SC0201 超音波ジェル 250ml (3本) ¥8,400

